

# Protocole d'ajustement de toile

## Informations client

Nom :

Chambre :

Facilité :

Lève-personnes :

Barre de suspension utilisée :

## Modèle de toile

Nom/Numéro d'article :

Tissu :

Taille :



Sangles du dos :



Sangles vertes :

Sangles jaune :

Sangles rouges :

Sangles du jambe :



Sangles vertes :

Sangles jaune :

Sangles rouges :

### Sangles d'extension :

21180-10 [10cm/3.9"]  
21180-15 [15cm/5.9"]  
21180-20 [20cm/7.8"]  
21180-25 [25cm/9.8"]  
21180-35 [35cm/13.7"]

### Sangles d'extension :

21180-10 [10cm/3.9"]  
21180-15 [15cm/5.9"]  
21180-20 [20cm/7.8"]  
21180-25 [25cm/9.8"]  
21180-35 [35cm/13.7"]



### Situation de transfert:



Vers/depuis le lit



Vers/depuis la chaise



Vers/depuis l'étage



Se doucher (25045 seulement)

### Placement des bras:



Dedans



Dehors

### Placement des jambes:



Jambes séparées 2-points



Jambes séparées 3-points



Jambes séparées



Jambes fermées

### Suspension:

2-Points



4-Points



3-Points



4-ESB  
4-MSB



### Accessoires requis:



21146 Rembourrage - Petit   
21146 Rembourrage - Medium   
21146 Rembourrage - Grand



25102 Support de jambe renforcé - Une taille



50866 Housse rembourrée pour barre de suspension. **Ne pas utiliser dans des environnements humides.**

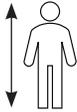
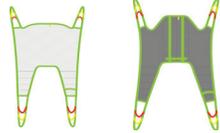
## Remarques:

Protocole d'ajustement complété par :

Poste/Titre :

Date :

## Recommandation de taille :

					
Poids de l'utilisateur kg/lbs	Hauteur du client cm/inch	Hauteur du dossier du client* cm/inch	Largeur des hanches du client* cm/inch	Taille recommandée*	Couleurs
15-20 / 33-44	110-130 / 43-51	55-65 / 22-25	23-30 / 9-12	Junior Small (JS)	
20-35 / 44-77	120-150 / 47-59	60-75 / 23-29	29-38 / 11-15	Junior Medium (JM)	
30-60 / 66-132	140-170 / 55-67	70-85 / 27-33	36-42 / 14-17	Small (S)	
55-90 / 121-198	160-190 / 63-75	80-95 / 31-37	41-47 / 16-19	Medium (M)	
85-120 / 187-264	180-206 / 71-81	90-103 / 35-40	46-55 / 18-22	Large (L)	
110-150 / 242-330	180-210 / 81-83	98-107 / 38-44	54-67 / 21-26	Extra Large (XL)	
140-200 / 309-441	180-210 / 81-83	106-110 / 40-46	60-74 / 23-29	Extra Extra Large (XXL)	
190-300 / 419-661	180-210 / 81-83	108-112 / 42-49	63-78 / 25-31	Extra Extra Extra Large (XXXL)	



Consultez le guide des tailles des toiles Human Care pour connaître les dessins et les mesures de nos toiles. Vous pouvez également retrouver des dessins sur chaque toiles dans le manuel d'utilisation, livré avec le produit et disponible sur nos sites internet.

\* Pour mesurer la hauteur du dos du client, mesurez du coccyx du client jusqu'au sommet de la tête.

\* Pour mesurer la largeur des hanches du client (Trochanter), demandez au client de s'asseoir et mesurez en ligne droite (pas la circonférence). Cela donne une indication de la largeur d'ouverture nécessaire du toile +/- 5 cm.

Ces tailles ne sont que des recommandations. Un ajustement correct doit toujours être effectué par un personnel cliniquement compétent à l'aide du manuel d'utilisation du toile. Veuillez noter que certains toile ne sont pas disponibles dans toutes les tailles. Vous trouverez des dessins sur chaque toile dans le manuel d'utilisation, livré avec le produit et disponible sur nos sites Internet.



**TOILE TROP GRAND**  
**TOILE TROP PETIT**

Le patient peut glisser.

Le patient est trop près du cintre/se sent trop serré sur le patient.

Protocole d'ajustement complété par :

Nom :

Date :

Poste/Titre :



**Important!** Ce protocole d'ajustement ne remplace pas le manuel d'utilisation. Lisez toutes les instructions avant utilisation !

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)