



Oval

Soutien optimal

E-Clips de sécurité  
(pinces)



## Soutien optimal

Notre harnais E-clip Columbus est un harnais ovale, ce qui le rend idéal pour les personnes qui ont besoin d'un soutien complet, même sous les fesses. Dans certains cas précis, ce concept peut s'avérer être une véritable révélation.



Ce harnais offre un soutien confortable à la tête, au torse, aux cuisses et même au siège, aidant le patient à se sentir en sécurité. Ce harnais convient parfaitement aux patients dont la stabilité du noyau est limitée et/ou dont le centre de gravité est différent en raison, par exemple, d'une amputation ou parce qu'ils portent un corset. La conception du harnais permet un soutien complet du patient, même sous les fesses, ce qui lui permet de s'asseoir et d'éviter que ses jambes ne glissent. Les coutures du textile Soft Air Mesh se trouvent à côté du siège du patient. Ce harnais offre un grand confort et évite les points de pression, ce qui procure au patient une sensation de soutien optimal.



S'asseoir en position inclinée réduira la pression sur la jambe du patient, et ce harnais vous aidera à y parvenir lorsqu'il est utilisé en combinaison avec une barre

de suspension à quatre points. En position inclinée, les patients dont la stabilité du tronc est réduite et/ou qui ont tendance à s'étirer trop ne glisseront pas aussi facilement du harnais. L'appuie-tête intégré et renforcé permet même de soulever le patient depuis une surface plane, comme le sol.

Le **Soft Air Mesh™** est un tissu léger, frais, doux et respirant. Il possède des propriétés d'évacuation de l'humidité, ce qui signifie qu'il évacue l'humidité de la peau à travers le tissu où elle peut s'évaporer rapidement. Un autre avantage de ce matériau : il est antibactérien pour une hygiène optimale. Le harnais a des propriétés « bi-extensibles », ce qui lui donne l'impression d'être une seconde peau. Compatible avec les élévateurs mobiles Diana II Comfort et Diana II 4 MSB.



Dispositifs d'aide  
à la mobilité



Lits de soins de  
santé



Solutions de levage



Hygiène



Fauteuils de transfert  
convertibles

## Accessoires



### Barre d'écartement

Pour le levage fixe HeliQ, disponible en petit (manuel), moyen et grand (électrique). N° d'art. 92441, 92442 et 92443.



### Barre d'écartement

Pour Diana II Comfort 4ESB (électrique). N° d'art. 90560.



### Barre de suspension à 4 points

Pour Diana II/ Diana II Comfort 4MSB (manuel), n° art. 90558/ 90559.

## Usage



### De et vers le lit

Convient pour soulever les clients du lit et les aider à s'asseoir sur le lit.



### De et vers une chaise


Convient pour le positionnement dans un fauteuil et pour les transferts vers et depuis un fauteuil.



### Soulèvement à partir du sol

Conçu pour les élévations depuis le sol.

## Caractéristiques

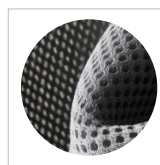


### Maille aérée douce (Soft Air Mesh)

Grande réduction de la pression. Excellente répartition de la pression grâce à la 3D-structure du tissu. Préviend et protège.



### Verrouillage intégré e-clip

Peut être utilisé d'une seule main. Universellement compatible avec tous les élévateurs équipés d'attaches champignon Ø 6,8-8,2 mm. Ø 6,8-8,2 mm.

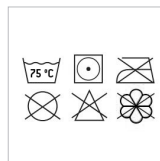


### Instructions de nettoyage et d'entretien

Pour les instructions de nettoyage et d'entretien, consultez l'étiquette. Laver dans un sac à lessive agréé.

## Spécifications techniques

Noms de produits	Numéro d'article	Taille	Couleur	A	B	C
Harnais Columbus E-clip Soft JS	25040C-JS	Junior Small	JS	42 cm/16,5 po	77 cm/30,3 po	124 cm/48,8 po
Harnais Columbus E-clip Soft JM	25040C-JM	Junior Medium	JM	44 cm/17,3 po	80 cm/31,5 po	130 cm/51,2 po
Harnais Columbus E-clip Soft S	25040C-S	Small	S	46 cm/18,1 po	84 cm/33 po	138 cm/54,3 po
Harnais Columbus E-clip Soft M	25040C-M	Medium	M	53 cm/20,9 po	92 cm/36,2 po	143 cm/56,3 po
Harnais Columbus E-clip Soft L	25040C-L	Large	L	57 cm/22,4 po	92 cm/36,2 po	153 cm/60,2 po
Harnais Columbus E-clip Soft XL	25040C-XL	Extra Large	XL	69 cm/27,2 po	105 cm/41,3 po	156 cm/61,4 po
Harnais Columbus E-clip Soft XXL	25040C-XXL	Extra extra large	XXL	69 cm/27,2 po	110 cm/43,3 po	160 cm/63 po
Poids maximum de l'utilisateur	272 kg/600 lb					

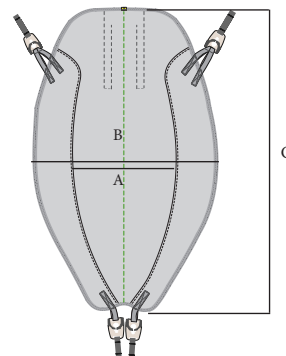

Nous améliorons la liberté de mouvement  
et la qualité des soins aux personnes.

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)



### HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
[humancaregroup.com](http://humancaregroup.com)

### HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
[info.ca@humancaregroup.com](mailto:info.ca@humancaregroup.com)

### HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
[info.nl@humancaregroup.com](mailto:info.nl@humancaregroup.com)

### HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin, États-Unis  
+1 512 76 7199  
[info.us@humancaregroup.com](mailto:info.us@humancaregroup.com)